



Head lapsevanemad!

Palun lugege hoolikalt kasutusjuhendit, sest see sisaldab olulist informatsiooni, mida tuleb selle meditsiiniseadme kasutamisel meeles pidada. Kui teil on mis tahes küsimusi, pidage palun nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutusjuhend

Koostis: Dimetikoon (92%, suure ja väikese viskoossusega), keskmise ahelaga triglütseriidid, jojobavaha, lõhnainad

Kasutamise eesmärk: NYDA[®] express'i kasutatakse peatäide nakkuse (pea pedikuloosi) füüsiliseks raviks juustes. Kui NYDA[®] express'i kasutatakse vastavalt juhiste, on see efektiivne ka noortäide ja täimunade (tingude) vastu.

Toimemehhanism: NYDA[®] express ei sisalda kahjulikke putukamürke. Lahus tungib sügavale täide, noortäide ja munade (tingude) lahutamissüsteemi, mis viib nende lämbumiseni. Kuna see toimemehhanism on füüsikaline, ei ole täide resistentsuse kujunemine võimalik.

Vastunäidustused: NYDA[®] express'i ei tohi kasutada inimesed, kes on teadaolevalt ülitundlikud toote mis tahes koostisosade suhtes. Allergiliste reaktsioonide tekkimisel tuleb ravi NYDA[®] express'iga kohe lõpetada.

Hoiatused: NYDA[®] express on mõeldud ainult välispidiseks kasutamiseks.

NYDA[®] express'i kasutades ärge laske lahusel sattuda silma ega limaskestadele (suhu ja ninna). Kui lahust satub kogemata silma, loputage silmi 10-15 minuti jooksul rohke veega. Ärrituse püsimisel pidage palun nõu oma arsti või apteekriga.

NYDA[®] express'i ei tohi sisse hingata.

NYDA[®] express võib reageerida teatud juuksehooldusvahendite või juuksevärvidega.

Kuna mõned koostisosad on kergesti süttivad, ei tohi NYDA[®] express'i kasutada lahtise tule või kuumaalikate lähedal. Hoidke NYDA[®] express'i eemal süüteallikatest ja ärge suitsetage ravi ajal.

NYDA[®] express on õline lahust. Kui seda on kogemata valgunud või pihustunud mis tahes pinnale, esineb oht libastuda. Seetõttu tuleb määratud pindade puhastamiseks lahust kohe hoolikalt ära pühkida.

Kõrvaltoimed: Harvadel juhtudel võib mõni selle toote koostisosa vallandada allergilisi reaktsioone.

Millele pöörata tähelepanu teatud patsiendirühmades: NYDA[®] express sobib kasutamiseks igas vanuses ning seda võib kasutada ka raseduse ja imetamise ajal.

Kasutusjuhend: Palun järgige neid juhiseid, et kõrvaldada edukalt peatäide nakkus.

Enne NYDA[®] express'i esmakordset kasutamist tuleb klaaspudelile keerata pakendis olev jaotuspump. Selleks eemaldage pudelilt keeratav kork ja keerake tugevasti külge jaotuspump. Hoidke pihustipudelit alati püsti, vastasel juhul ei saa pump korralikult töötada. Palun pange tähele, et esmakordsel kasutamisel või kui seda ei ole pikka aega kasutatud, tuleb pumba täitmiseks sellele mitu korda vajutada. Kui soovite jaotuspumpa eraldi hoida, on soovitatav see tühjendada ja puhastada hoolikalt kuiva riielapiga.

Enne ravi NYDA[®] express'iga: Kontrollige kõigi pereliikmete juukseid NYDA[®] express'i täikammiga abil.

Ravige kõiki, kellel on täid, samal päeval, et vältida korduvat nakatumist. Pusede eemaldamiseks juustest enne ravi võib kasutada tavalist kammi. Seda kammi tuleb pärast kasutamist korralikult puhastada.

Ravi NYDA[®] express'iga: Ravi ajaks NYDA[®] express'iga on soovitatav panna rätik õlgade-kaela piirkonda juuste alla.

NYDA[®] express'i tuleb panna kuivadesse juustesse.

1. Pihustage NYDA[®] express'i lahust hoolikalt kuivadesse juustesse.

Pihustage NYDA[®] express'i juustesse hoolikalt kogu pikkuses.

NYDA[®] express'i vajalik kogus sõltub juuste paksusest ja pikkusest. Veenuduge, et juuksed on eriti hästi NYDA[®] express'iga kaetud just peanaha lähedal ning kõrvade taga, kuna seal on täisid ja tingusid kõige rohkem. Jagage pikad ja tihedad juuksed salkudeks.



Lisatoimingud peatäide nakkuse korral:

Vältimaks peatäide levimist ja hoidmaks ära korduvat nakatumist, peab kõiki pereliikmeid täinnakkuse suhtes kontrollima ning vajadusel kohe ravima.

Juhsed säilitamiseks:

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. NYDA[®] express'i ei tohi kasutada pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

Meditsiiniseadmeid tuleb säilitada ettevaatusega. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Kuna mõned koostisosad on kergesti süttivad, ei tohi NYDA[®] express'i kasutada lahtise tule või kuumaalikate lähedal. Hoidke NYDA[®] express'i eemal süüteallikatest ja ärge suitsetage ravi ajal.

Toodetud Saksamaal

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG
Kieler Strasse 11, 25551 Hohenlockstedt, Saksamaa

Levitaja:

KBM Pharma OÜ, Tähtvere 4, 51007 Tartu

Info uuendamise kuupäev: jaanuar 2023

